

COLDISEPT nanoSILVER ausu pilieni

Medicīniskā ierīce ausu pilienu veidā, kuru izmanto kā papildu terapiju ārējā dzirdes kanāla iekaisuma, kas radies baktēriju un sēnīšu infekciju rezultātā, gadījumā.

COLDISEPT nanoSILVER ausu pilieni ir paredzēti ievadīšanai ārējā dzirdes kanālā, lai mīkstinātu un attīrītu, un izveidotu aizsargbarjeru uz ādas virsmas. Produkts satur sudraba un vara nanodaļiņas, kas ierobežo baktēriju un sēnīšu augšanu. COLDISEPT nanoSILVER ausu pilieni palīdz dažādas etioloģijas ārējās auss ejas iekaisumu ārstēšanai.

SASTĀVS

Attīrīts ūdens, glicerīns, propilēnglikols, koloidālais nano-sudrabs, koloidālais nano-varš.

BLAKUSPARĀDĪBAS

COLDISEPT nanoSILVER ausu pilienus blakusparādības nav zināmas, tomēr īpaši jutīgiem cilvēkiem nevar izslēgt alerģijas simptomu rašanos. Ja rodas alerģiska reakcija, pārtrauciet produkta lietošanu.

PAPILDU INFORMĀCIJA UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Nelietojiet produktu, ja Jums ir alerģija pret kādu no sastāvdaļām.

Nelietojiet produktu, ja bungādiņa ir perforēta.

Neievietojiet dozatoru pārāk dziļi auss kanālā.

Nepieļaujiet nejaušu nokļūšanu acīs vai mutē.

Pārtrauciet produkta lietošanu, ja rodas jebkādi brīdinoši simptomi.

Nelietojiet pēc derīguma termiņa beigām!

Grūtnieces un bērni līdz 6 gadu vecumam drīkst lietot produktu tikai ārsta uzraudzībā.

Par visiem nopietniem nevēlamiem notikumiem, kas radušies saistībā ar šīs medicīniskās ierīces lietošanu, jāpaziņo ražotājam un pacienta dzīvesvietas valsts kompetentajai iestādei.

Kompetentā iestāde: Zāļu valsts aģentūra, Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003.

LIETOŠANA UN DEVAS

Lietojiet COLDISEPT nanoSILVER ausu pilienus trīs reizes dienā, vismaz 3 dienas pēc iekaisuma simptomu izzušanas.

Viegli sasildiet pudeli (vēlams Jūsu rokās).

Nogulieties ar ausi uz augšu.

Lietojiet 5 pilienus (ja ārsts nav norādījis citādi) un palieciet šajā stāvoklī 3-5 minūtes.

Izmantojiet regulāri, atbilstoši individuālajām vajadzībām.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C, sausā, bērniem nepieejamā vietā.
Iepakojumā 15 ml