

COLDISEPT nanoSILVER deguna aerosols

Medicīniskā ierīce COLDISEPT nanoSILVER deguna aerosols – izsmidzināmais līdzeklis, kas atvieglo deguna gļotādas sausuma un kairinājuma sajūtu, aizsargājot pret ārējo faktoru kaitīgo iedarbību. COLDISEPT nanoSILVER deguna aerosols mitrina un nomierina deguna gļotādas kairinājumu, veicinot tās atjaunošanos un novēršot dedzināšanas sajūtu.

Produkts satur sudraba nanodaļiņas, kas ierobežo baktēriju augšanu. Produkts veido želejveida slāni, kas pasargā no baktērijām un vīrusiem un veicina gļotādas atjaunošanos.

Preparāta īpašības pamatojas uz minerālsāļu un augu ekstraktu iedarbību.

SASTĀVS

Attīrīts ūdens, koloidālais nano-sudrabs, īru sarkano aļģu ekstrakts (karagināns), sorbīts, glicerīns, minerālsāļi (kālija dihidrogēnfosfāts, kālija hlorīds, nātrijs hlorīds, kalcija hlorīda heksahidrāts, magnija hlorīda heksahidrāts), nātrijs benzoāts, citronskābe.

INDIKĀCIJAS

Lietojiet deguna gļotādas sausuma un kairinājuma gadījumos neatkarīgi no to veidošanās cēloņiem. Īpaši ieteicams šādos gadījumos:

- atrofiskais rinīts;
- infekciozais vai alerģiskais rinīts;
- tādu zāļu lietošana, kas bojā deguna gļotādas epitēliju;
- sinusīts;
- gaisa piesārņojums un putekļi;
- ļoti augsta vai ļoti zema apkārtējās vides temperatūra;
- gados vecākiem cilvēkiem;
- sausums, ko izraisa centrālā apkure vai gaisa kondicionēšana;
- smēķēšana.

BLAKUSPARĀDĪBAS

Deguna aerosols COLDISEPT nanoSILVER blakusparādības nav zināmas, tomēr īpaši jutīgiem cilvēkiem nevar izslēgt alerģijas simptomu rašanos. Ja rodas alerģiska reakcija, pārtrauciet produkta lietošanu.

PAPILDU INFORMĀCIJA UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Nelietojiet produktu, ja Jums ir alerģija pret kādu no sastāvdaļām.

Nelietojiet produktu, ja Jums ir alerģija pret metālisko sudrabu.

Nepieļaujiet nejaušu nokļūšanu acīs.

Pārtrauciet produkta lietošanu, ja rodas jebkādi brīdinoši simptomi.

Nelietojiet pēc derīguma termiņa beigām!

Ja aplikators ir netīrs, noņemiet aplikatoru, nomazgājiet un novāriet vai rūpīgi noskalojiet ar verdošu ūdeni.

Grūtnieces un bērni līdz 6 gadu vecumam drīkst lietot produktu tikai ārsta uzraudzībā. Produktu var lietot ilgstoši bez atkarības, blakusparādību vai komplikāciju rašanās riska. Par visiem nopietniem nevēlamiem notikumiem, kas radušies saistībā ar šīs medicīniskās ierīces lietošanu, jāpaziņo ražotājam un pacienta dzīvesvietas valsts kompetentajai iestādei. Kompetentā iestāde: Zāļu valsts aģentūra, Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003.

LIETOŠANA UN DEVAS

Lietojiet līdzekli 3-4 reizes dienā, atbilstoši individuālajām vajadzībām. Pirms pirmās lietošanas nospiediet dozatoru vairākas reizes. Ievietojiet aplikatoru nāsī. Izsmidziniet 1-2 devas (nospiežot dozatoru).

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C, sausā, bērniem nepieejamā vietā. Iepakojumā 20 m